

RINOSUN[®]

ADULT

Indicații

Pentru tratamentul durerilor în gât.

Forma de prezentare

Recipient din aluminiu cu pulverizator, de 30 ml (aproximativ 130 pufuri).

Compoziție


Glicerol, Apă, Miere, Glycoyanidin-a (derivat din extracte din sămburi de Vitis vinifera și fructe de Sambucus nigra).

Mod de acțiune

RinoSun[®] Adult este o soluție hipertonică, vâscoasă, care formează un film de protecție la nivelul mucoasei, special formulat să trateze durerile în gât. Când este pulverizat în gât, RinoSun[®] Adult formează un film osmotic activ care atrage prin acțiune mecanică fluidul hipotonic de la nivelul gâtului. Acest flux exterior, puternic și continuu, de lichid detașează mecanic și drenează contaminanții prezenți la nivelul gâtului, inducând bacterii, virusuri, celule moarte și resturi celulare. Dispozitivul acționează astfel ca o soluție instantanee de curățare. Curățând mucoasa gâtului, dispozitivul stimulează apărarea și vindecarea acesteia. RinoSun[®] Adult are acțiune topică și mecanică, fără a fi absorbit în organism. Filmul creat protejează, de asemenea, gâtul de iritație și de agresiunea externă. Rezultatele clinice arată o reducere rapidă și evidentă a durerii, iritației, roșeții și inflamației, precum și a depozitului albicios de la nivelul gâtului. Reducerea contaminării bacteriene minimizează nevoia de antibiotice.

Mod de utilizare

Agitați ușor flaconul și îndepărtați capacul, și, înainte de prima utilizare, apăsați o dată sau de două ori pe pulverizator pentru punerea în funcțiune a pompei dozatoare. Îndreptați vârful aplicatorului dispozitivului cum se arată în imaginea de mai jos și apăsați pe pulverizator pentru a elibera produsul în partea superioară a gâtului. Pulverizați de 4 – 5 ori pentru a forma un strat subțire de produs la nivelul mucoasei gâtului. Produsul fiind vâscos, unele picături de produs pot rămâne pe vârful pulverizatorului. Ștergeți vârful cu ajutorul unei hârtii absorbante sau al unui bețișor igienic din bumbac și acoperiți cu capacul după fiecare utilizare.

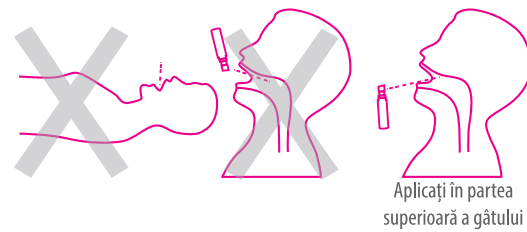

Se recomandă să folosiți produsul la fiecare 30 de minute la începerea tratamentului, în primele 2 ore, apoi de 3-4 ori pe zi pe zi până la recuperarea completă.
Doza zilnică furnizează mai puțin de 2 g de zahăr pe zi.

Precauții

Citiți cu atenție instrucțiunile din prospect înainte de utilizare și respectați indicațiile. Acest produs este doar pentru uz topic (gât). Spălați-vă mâinile înainte de utilizare. Pentru a reduce riscul de infecții încrucișate, fiecare spray trebuie utilizat doar de un singur pacient. Pulverizați produsul numai în partea superioară a gâtului și evitați inhalarea în timp ce pulverizați. Se va evita consumul de alimente sau lichide în următoarele 15 – 30 minute după aplicarea produsului.
Recomandăm să cereți sfatul medicului dacă simptomele persistă, fără o îmbunătățire, după 7 zile de utilizare a produsului.

Păstrare

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor. Depozitați la temperatura camerei. Nu păstrați produsul la frigider; ferți-l de îngheț. Nu folosiți dacă au trecut mai mult de 30 de zile de la prima utilizare, după data de expirare sau dacă recipientul este deteriorat.

Interacțiuni

Datorită compoziției și modului de acțiune, mecanic & topic, este puțin probabilă interacțiunea cu alt tratament sistemic. Nu aplicați niciun alt tratament topic oral cu 15 minute înainte sau după utilizarea acestui produs.

Contraindicații

Verificați compoziția produsului și nu utilizați dacă sunteți sensibil sau alergic la oricare dintre ingrediente (mierea poate conține urme de polen). Deși toate ingredientele utilizate pentru prepararea acestui produs sunt derivate din ingrediente alimentare și utilizate în cantități foarte mici, în absența unor suficiente date specifice de siguranță, nu recomandăm utilizarea acestui produs în timpul sarcinii sau alăptării fără consiliere medicală, la copiii cu vârsta sub 12 ani sau la pacienții care suferă de astm sau afecțiuni respiratorii severe.

Efecte adverse

RinoSun[®] Adult nu este periculos dacă este înghițit. Evitați contactul cu ochii. În caz de contact, spălați bine ochii cu apă. Dacă observați orice tip de reacție alergică în minutele următoare aplicării produsului, încetați utilizarea acestuia, clătiți gâtul cu apă curată, proaspătă și dacă e necesar consultați un profesionist din domeniul medical. Dacă observați un incident important din cauza utilizării acestui produs, vă rugăm să anunțați imediat producătorul/distribuitorul și autoritățile naționale competente.

Ambalajul (inclusiv recipientul) poate fi aruncat ca deșeu menajer după utilizare.

Revizuirea prospectului/versiunea: PHN b1-0120

Producător:

VITROBIO SAS
ZAC de Lavaur
63500 ISSOIRE
France

Distribuitor:

ASCENDIS WELLNESS SRL
Calea Floreasca, nr. 169
Sector 1, București, România
office@sunwavepharma.com

Fabricat în Franța



Dispozitiv medical

Simboluri utilizate:

	Marcaj de conformitate UE
	Numărul lotului
	Data de expirare

	Temperatura de păstrare: 10°C până la 40°C
	A se citi instrucțiunile de utilizare
12+	Vârsta minimă de utilizare